



AMIS
MOBILE LEG POSITIONER

INSTRUCTIVO
TRANS OPERATORIO

DISEÑO PATENTADO




MEDIDAS:



42cm

66cm

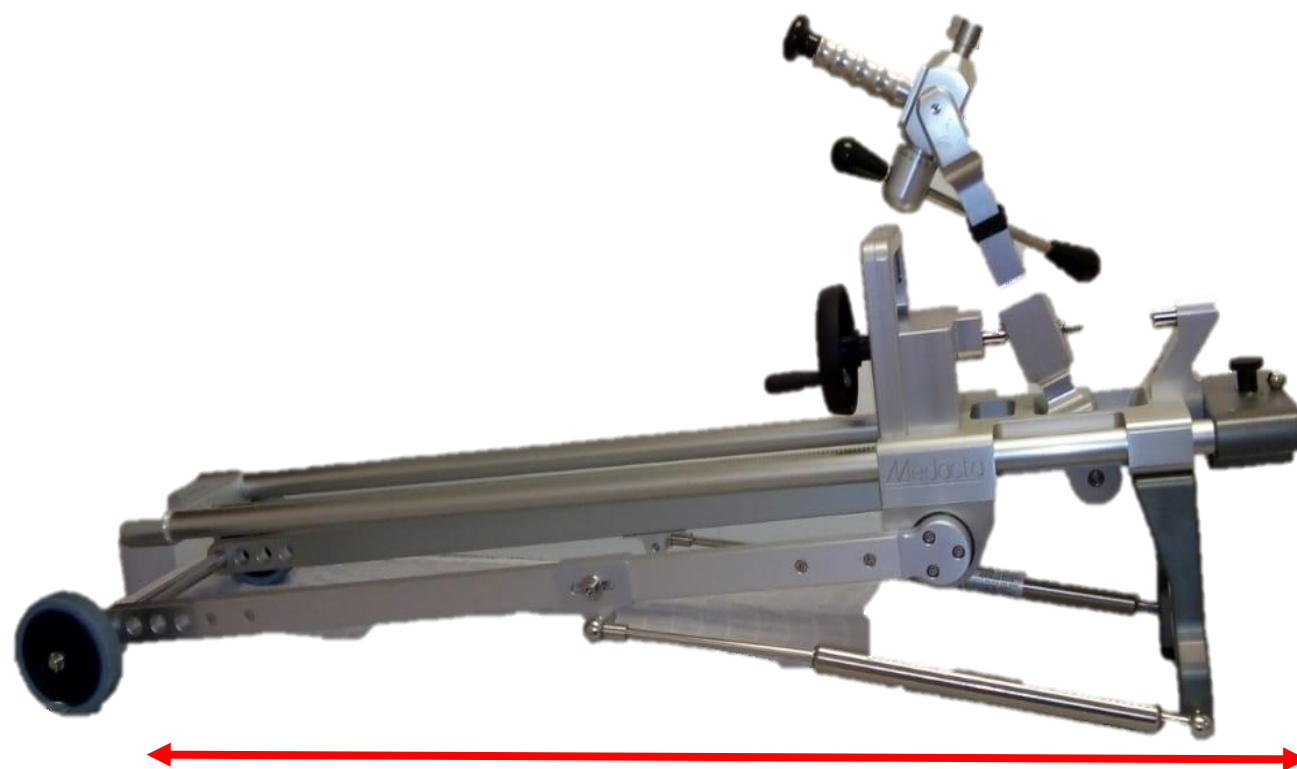

1.33m


PASO 0: POSICION INICIAL

0° A NIVEL DE
LA RODILLA
(PIE A ROTACIÓN INTERNA 10°)




El brazo de tracción debe colocarse al comienzo de la barra roscada para lograr la mayor longitud de maniobra durante la tracción. La rótula está a 0°

PASO 1: ANTES DE LA OSTEOTOMIA

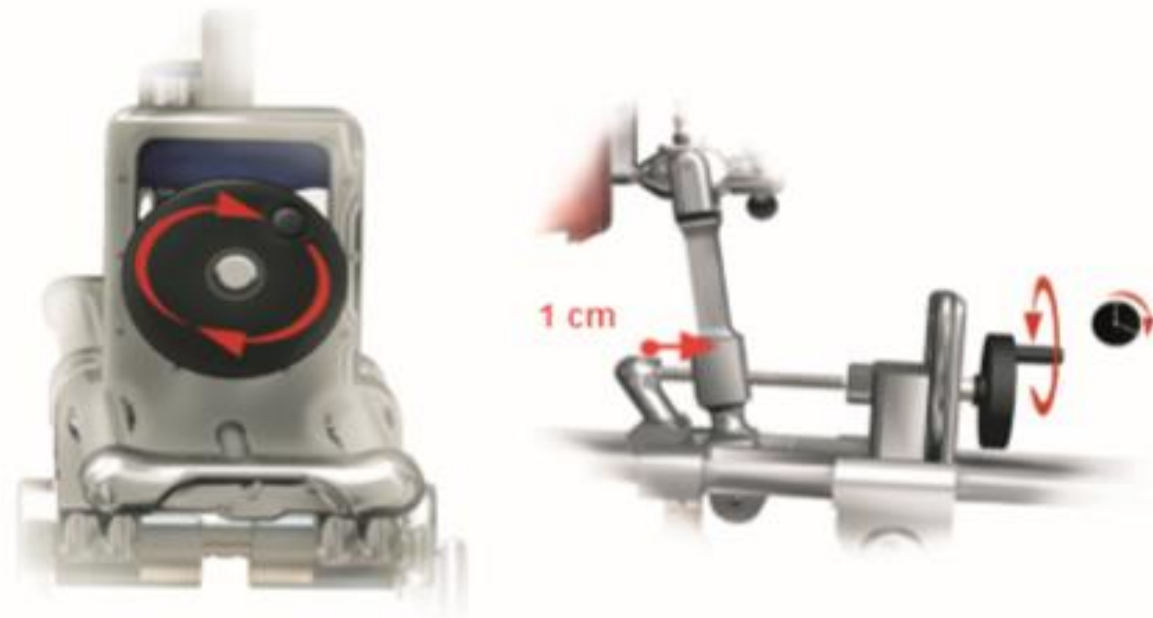

Antes de realizar el corte del cuello femoral, aumente la tracción unos 1 cm girando la rueda negra dos veces en el sentido de las agujas del reloj.

PASO 2: DESPUÉS DE CORTAR EL CUELLO FEMORAL

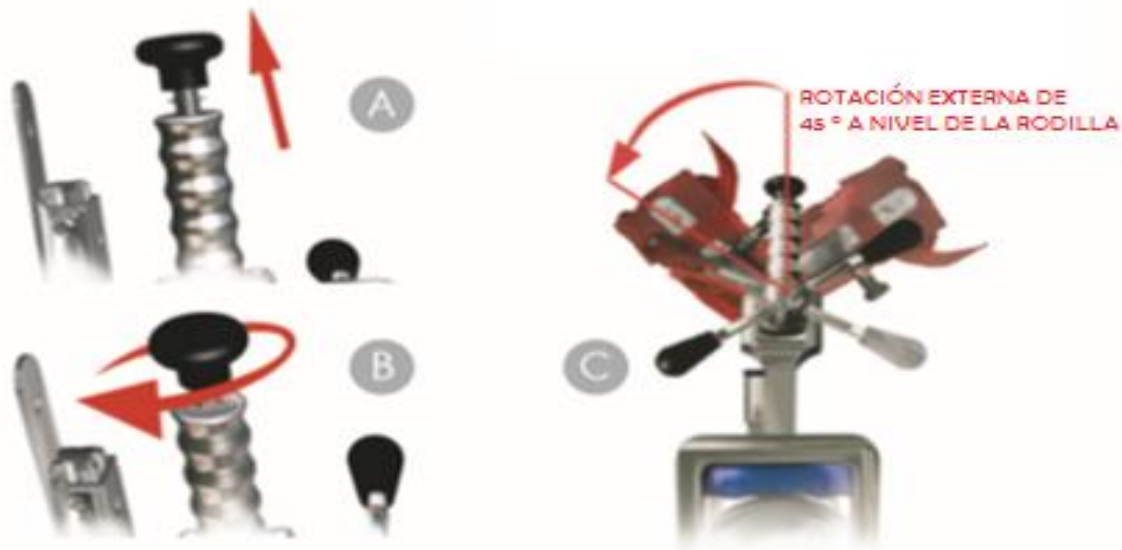

Gira la pierna para dar 45 ° de rotación externa:
a) Levante la perilla negra.
b) Gire la perilla 180 ° y suéltela para bloquear.
c) Aplique la rotación deseada girando el manillar.

PASO 3: DESPUÉS DE REMOVER LA CABEZA FEMORAL



La tracción se libera girando la rueda negra dos veces hacia la izquierda.

PASO 4: PREPARACIÓN FEMORAL



1 TRACCIÓN

Aplicar un poco de tracción con la rueda negra

2 ROTACIÓN EXTERNA: la rótula se gira

hacia afuera 90 °, o incluso más si es posible girando el manillar (la rotación externa de 180 ° del pie no es rara).

3 LIBERACIÓN DE TRACCIÓN: Libere la tracción

girando la rueda negra en sentido contrario a las agujas del reloj antes de colocar la pierna en hiperextensión

4 HIPEREXTENSIÓN: El posicionador de piernas AMIS® se puede bajar hacia el piso desbloqueando el mecanismo del carro (presione la palanca azul para desbloquear la función de hiperextensión).

5 ADDUCCIÓN: Mueva el posicionador de piernas AMIS® debajo de la extremidad inferior controlateral.

PASO 5: REDUCCIÓN



1

1 LIBERACIÓN DE ADDUCCIÓN: Mueva el posicionador de piernas AMIS® para liberar la aducción impuesta durante la preparación femoral.



2

2 LIBERACIÓN DE HIPEREXTENSIÓN Y TRACCIÓN CON EL CARRO: Libere la hiperextensión y ejerza la tracción moviendo el carro hacia adelante sobre la pierna. Al final, asegúrese de que el asa azul esté correctamente bloqueada.



3

3 LIBERACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ROTACIÓN EXTERNA: Desbloquee el mecanismo de rotación interno

- A Levante la perilla negra.
- B Gire la perilla 180° y suéltela para bloquearla. Si es necesario, completa la tracción girando la rueda negra.

- C Girar internamente la pierna girando el manillar.

4 LIBERACIÓN DE TRACCIÓN: Libere la tracción girando la rueda negra hacia la izquierda.



4